


Інструкція для ввімкнення моніторингу даних з додатку Glimp

1. Створення сесії по віддаленому моніторингу

Для створення сесії по віддаленому моніторингу Вам потрібно встановити Android додаток mHealth Connect, або відвідати сайт web.mhealth.com.ua (дані дії доступні лише авторизованим користувачам).

Після авторизації, у вікні «Дані сенсорів та графіки» («Пристрої»), натисніть кнопку (+) «Додати пристрій».

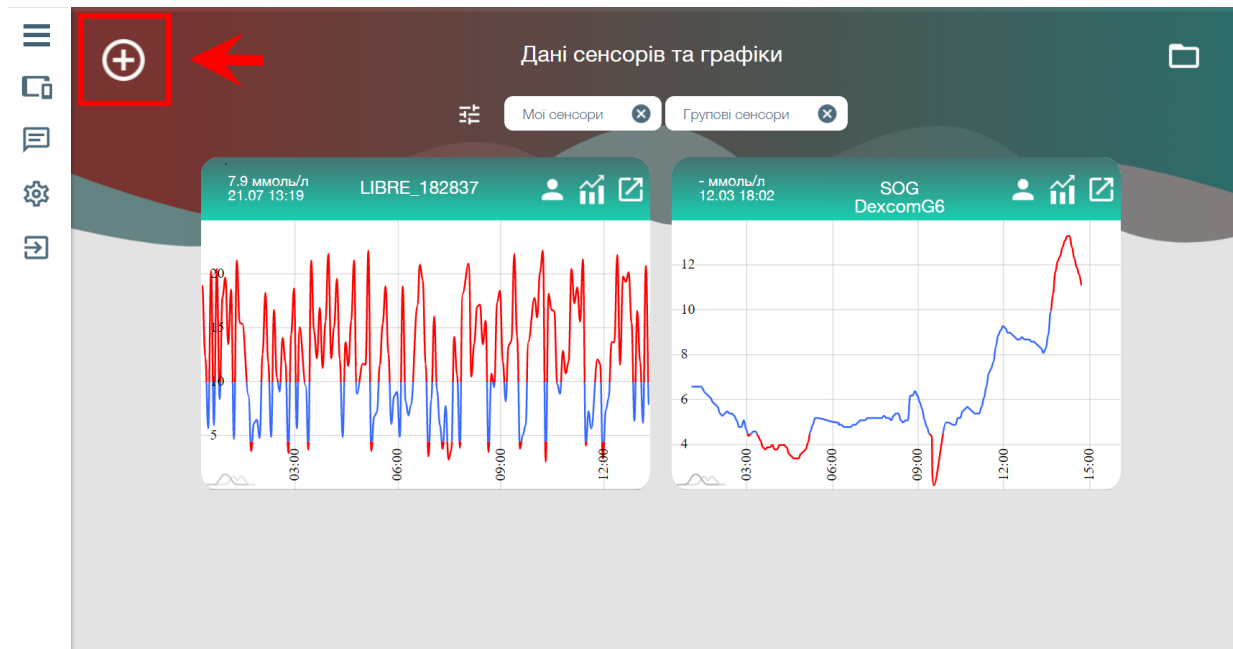

У новому вікні потрібно задати ім'я сенсора і вибрати тип (Glimp).

Новий пристрій

Ім'я сенсору

Тип

Тип

Glimp

xDrip

Spike



Отримання даних зі стороннього додатку

Моніторинг Насамперед та Spike. При автоматичн...

Також Ви м впродовж д статистику, останні значення. Додаток також призначається для лікарів, аби вони чітко бачили Ваші графіки та могли надати консультацію в будь-який момент, якщо це потрібно. Додаток надає можливість лікарям спостерігати не лише за одним пацієнтом, а за декількома одночасно включаючи по декілька сенсорів у різних людей, управляти відображенням потрібних даних, автоматично виводить останні значення у швидкий перегляд, сортуючи по рівнях.



Після даної операції у списку пристроїв зможете побачити щойно створений сенсор.
Далі для активації передачі потрібно провести наступні дії:

→ у випадку роботи через **додаток mHealth**: свайп вліво (кнопка адреса) - скопіювати в буфер обміну і вставити у додаток Glimp.

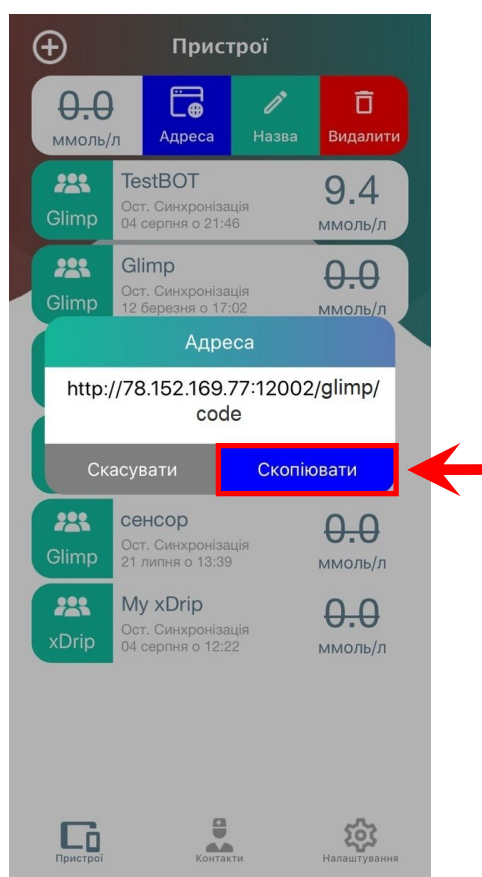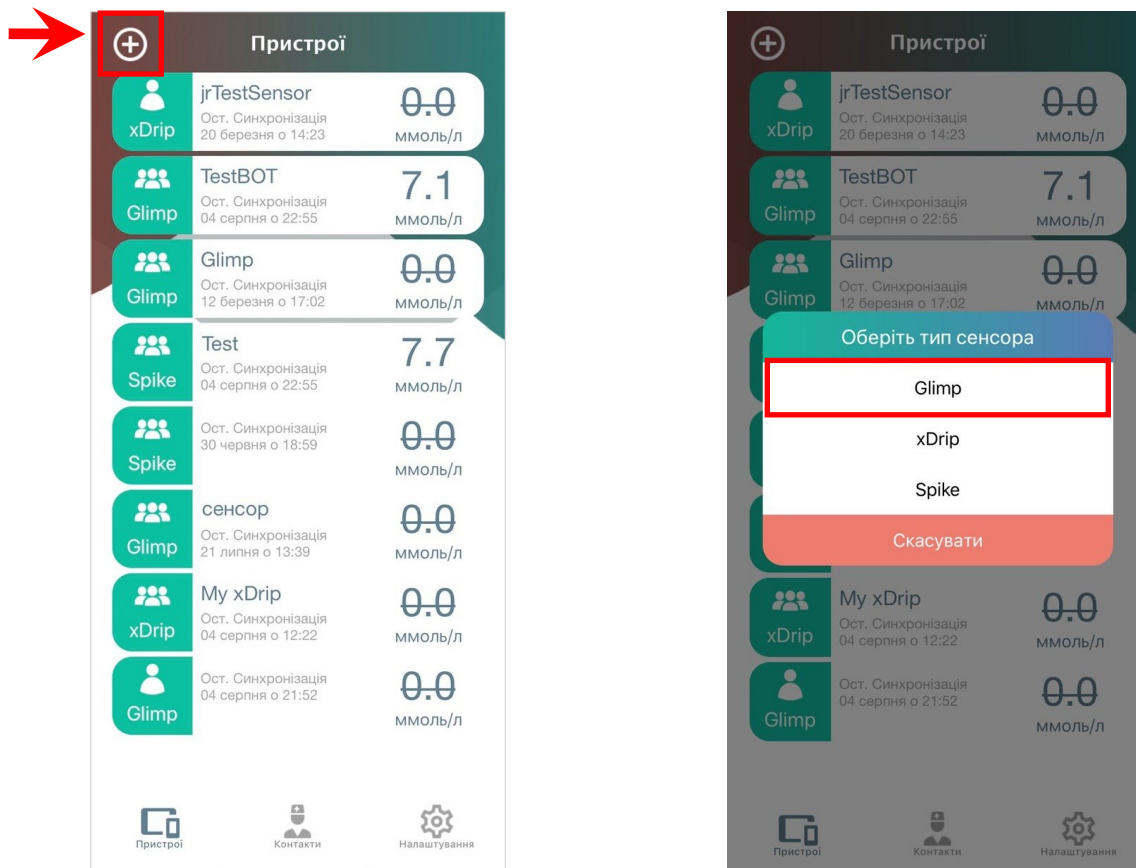



→ у випадку роботи **через сайт**: кнопка відкрити сенсор — виділити Код - скопіювати в буфер обміну, зібрати посилання і вставити його у додаток Glimp.

Примітка: Посилання виду - <http://78.152.169.77:12002/glimp/code> (де code - Код сенсора)

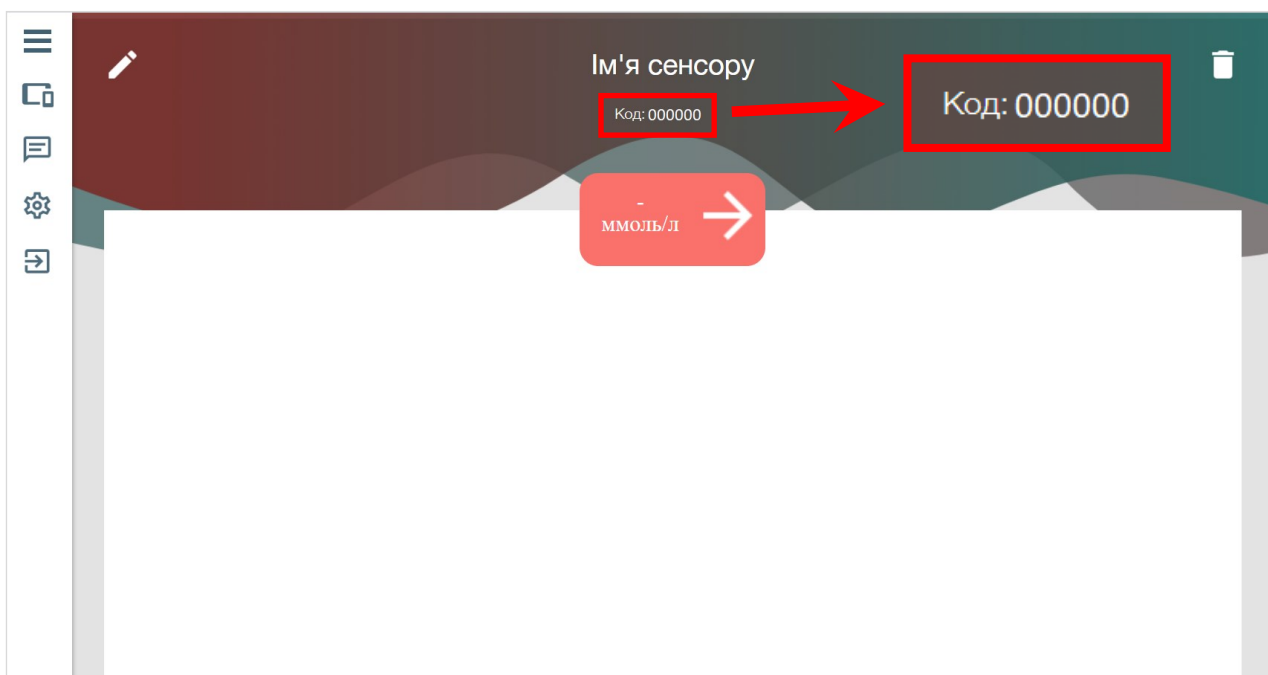
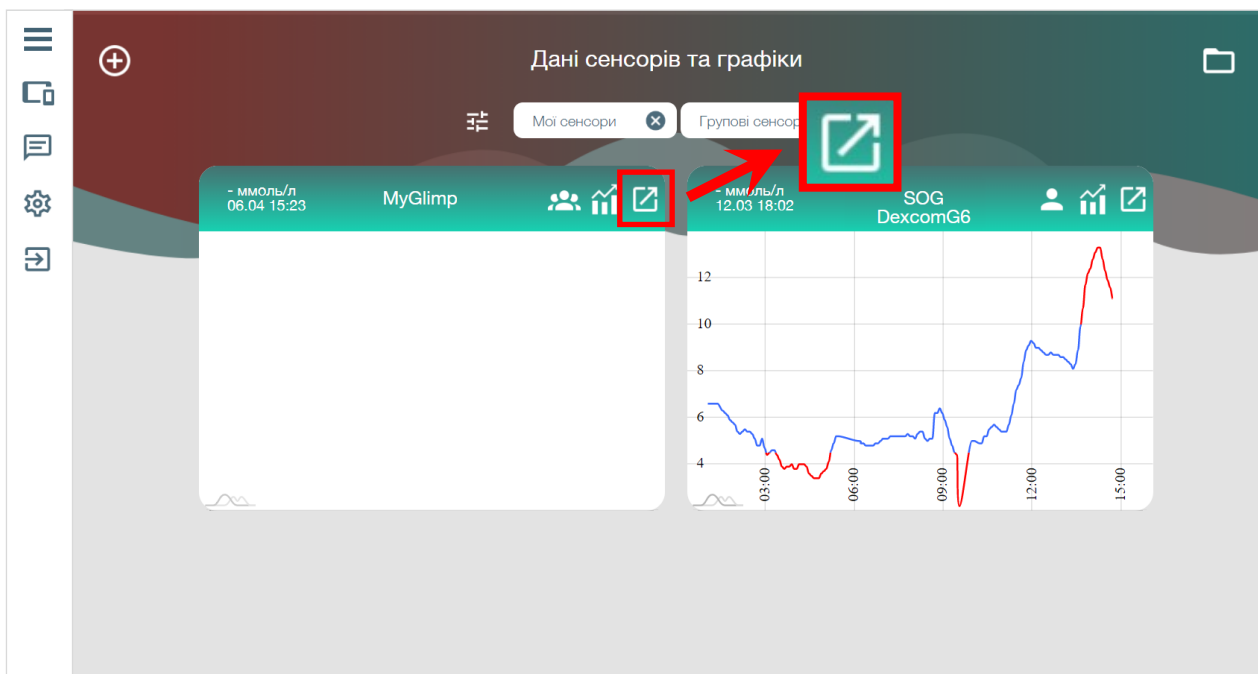


2. Налаштування додатку Glimp

В додатку Glimp відкриваємо налаштування і переходимо у вкладку «Віддалений моніторинг рівня ЦК».

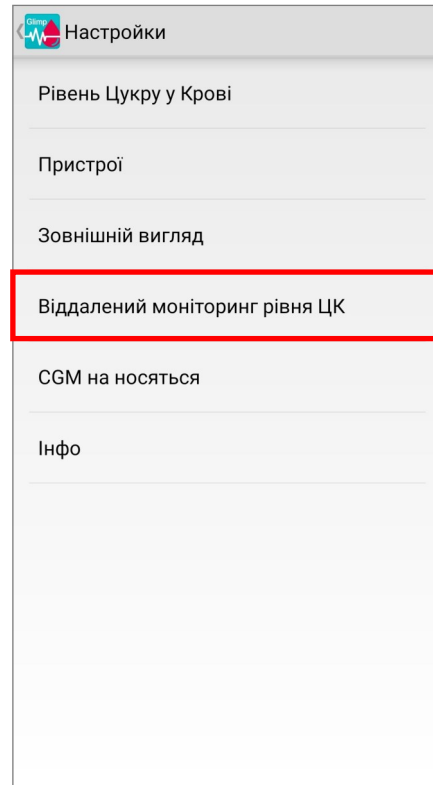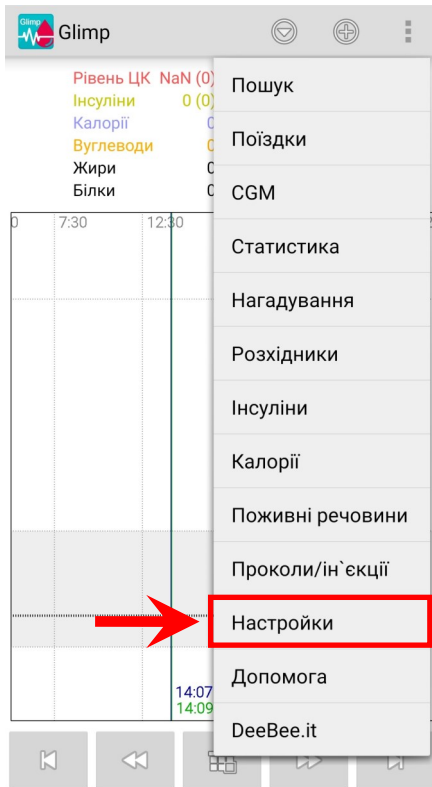



В меню, що з'явилося, натискаємо на поле «Website», далі в діалоговому вікні вводимо посилання, згенероване раніше, і натискаємо ОК.

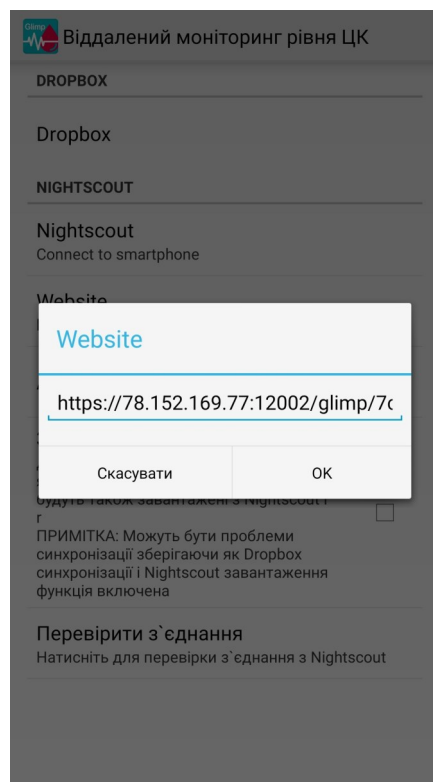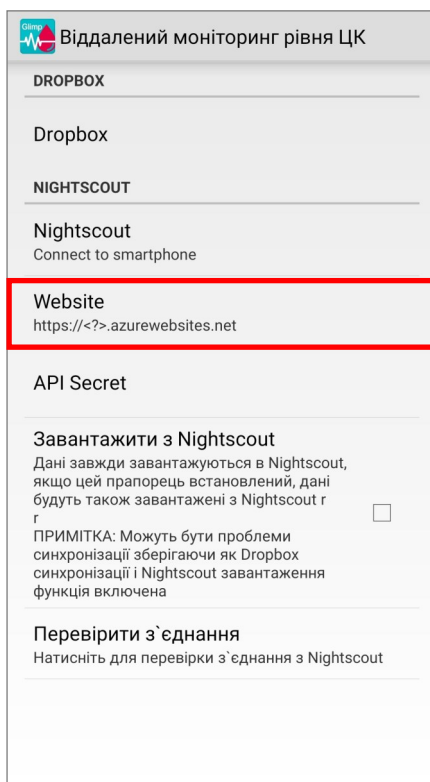


Наступним кроком обираємо меню «API Secret», вводимо туди довільну комбінацію англійських букв/цифр і натискаємо ОК.

Важливо! API Secret не має бути пустим або заповненим пробілами.

Якщо Ви також хочете завантажувати дані з серверу у Glimp - потрібно встановити галочку в меню моніторингу: «Завантажити з Nightscout».

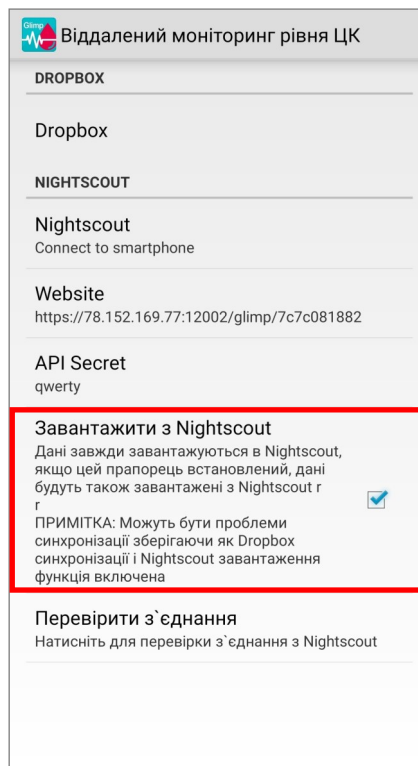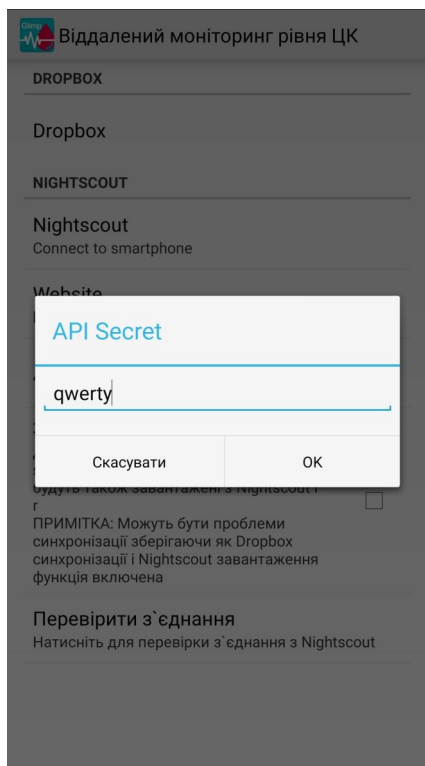

Для перевірки з'єднання в тому ж меню потрібно натиснути «Перевірити з'єднання». Якщо все буде успішно - з'явиться напис «Підключено».

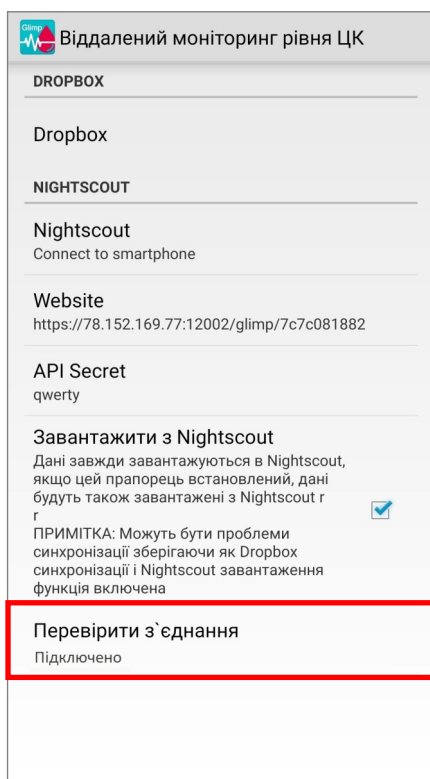

Перевірити з'єднання
Підключено



Примітки:

- щоб створити зв'язок між кількома додатками Glimp, потрібно повторити пункт 2 (Налаштування додатку Glimp), також, хоча б в одному з додатків має бути увімкнено «Завантажити з Nightscout».
- щоб отримувати дані про глюкозу з Glimp в додаток mHealth Connect - в налаштуваннях mHealth Connect має бути увімкнена синхронізація з сервером.