

Інструкція для ввімкнення моніторингу даних з додатку Spike

1. Створення сесії по віддаленому моніторингу

Для створення сесії по віддаленому моніторингу Вам потрібно встановити Android додаток mHealth Connect, або відвідати сайт web.mhealth.com.ua (дані дії доступні лише авторизованим користувачам).



Після авторизації, у вікні «Дані сенсорів та графіки» («Пристрої»), натисніть кнопку (+) «Додати пристрій».



У новому вікні потрібно задати ім'я сенсора і вибрати тип (Spike).

Після даної операції у списку пристроїв зможете побачити щойно створений сенсор.
Далі для активації передачі потрібно провести наступні дії:



→ у випадку роботи через додаток **mHealth**: свайп вліво (кнопка адреса) - скопіювати в буфер обміну і вставити у додаток Spike.

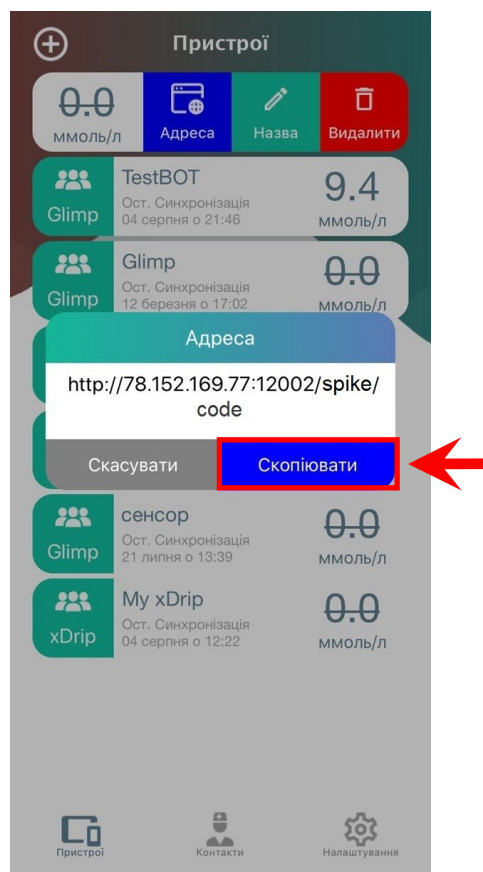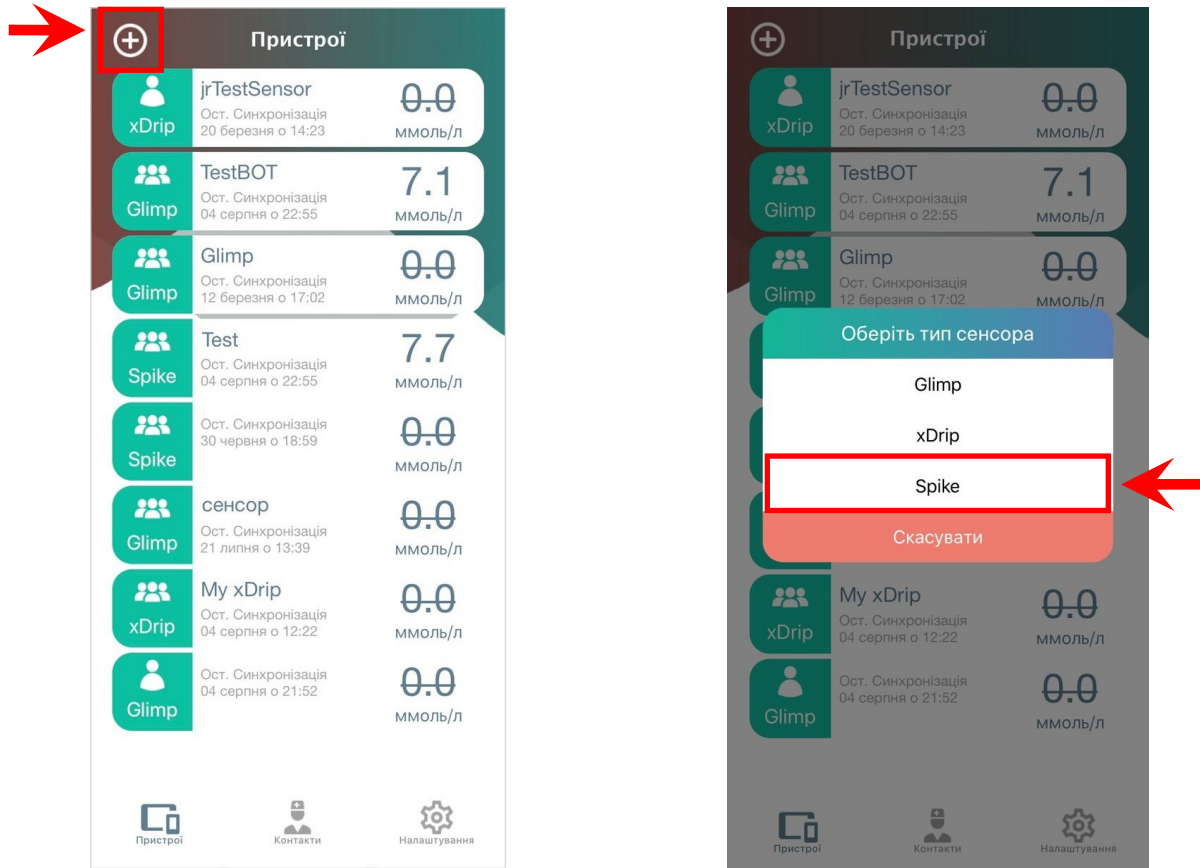

→ у випадку роботи **через сайт**: кнопка відкрити сенсор — виділити Код - скопіювати в буфер обміну, зібрати посилання і вставити його у додаток Spike.

Примітка: Посилання виду - <http://78.152.169.77:12002/spike/code> (де code - Код сенсора)

Після створення сенсору повертаємося у вікно «Дані сенсорів та графіки» («Пристрої»)



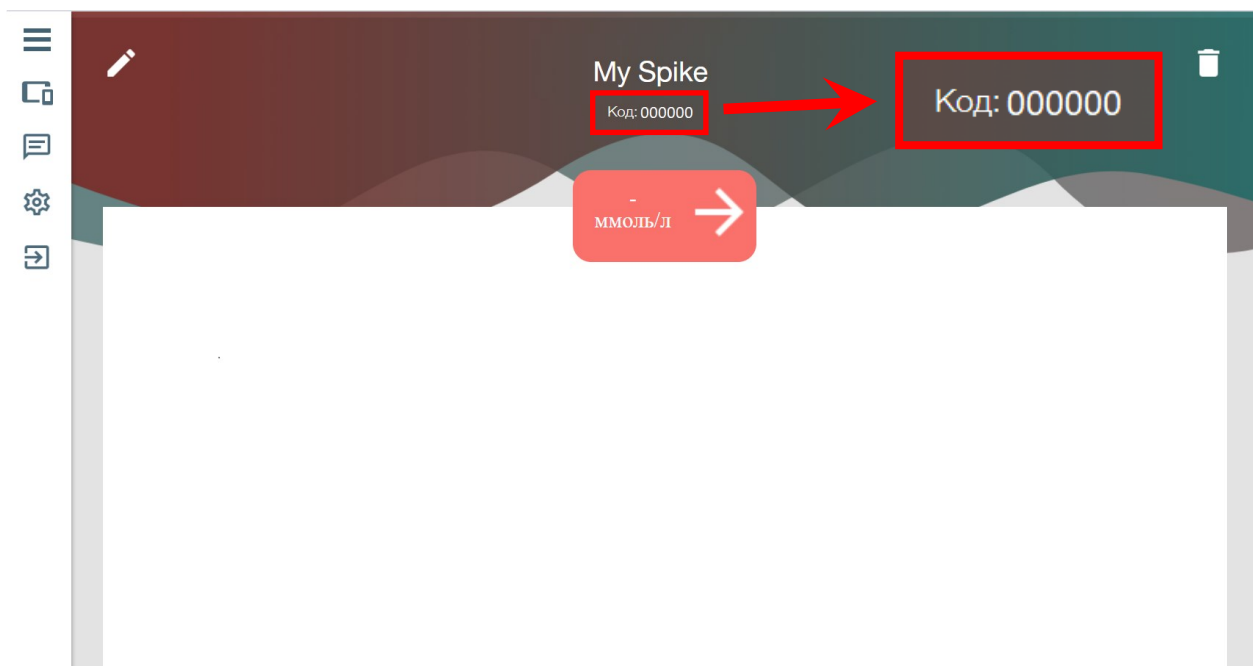
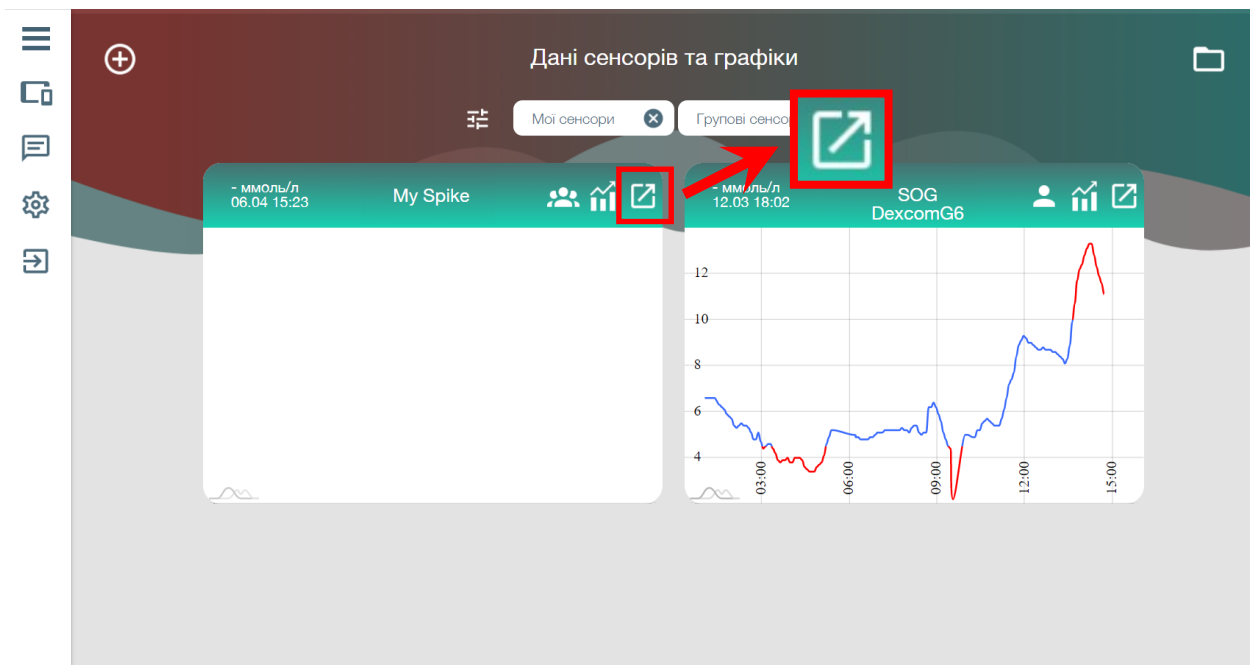


2. Налаштування додатку Spike

В додатку **Spike** відкриваємо налаштування.

При потребі отримання даних у налаштуваннях переходимо у вкладку “Основные”.


Для передачі даних на сервер потрібно увімкнути синхронізацію у меню “Общий доступ”.

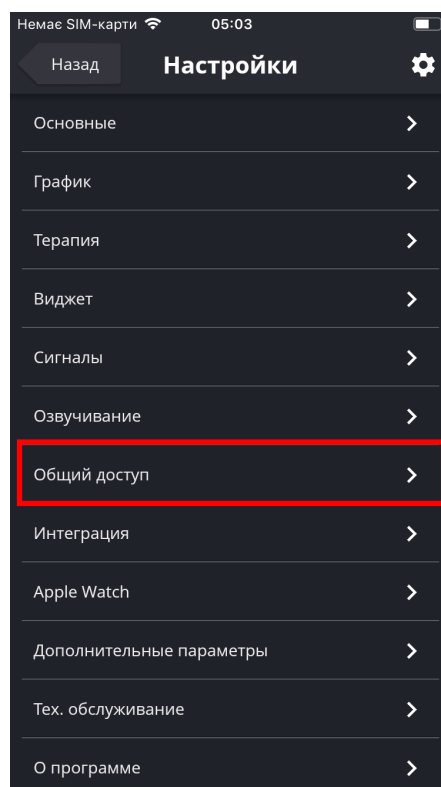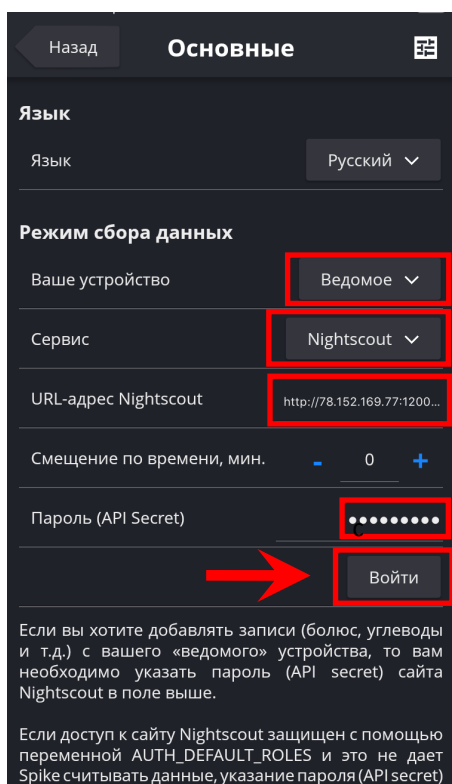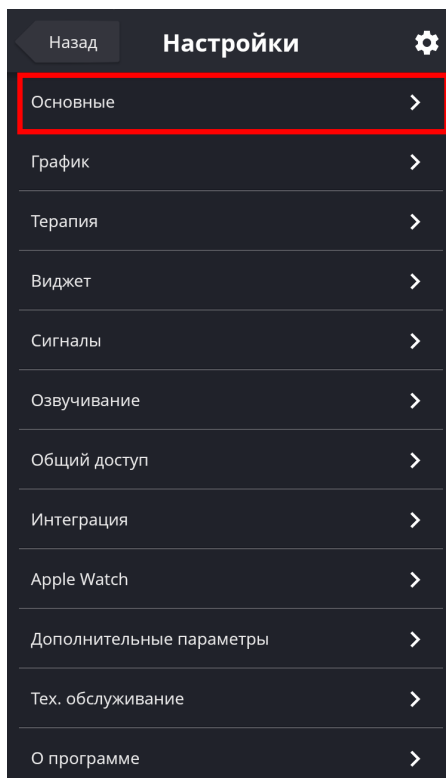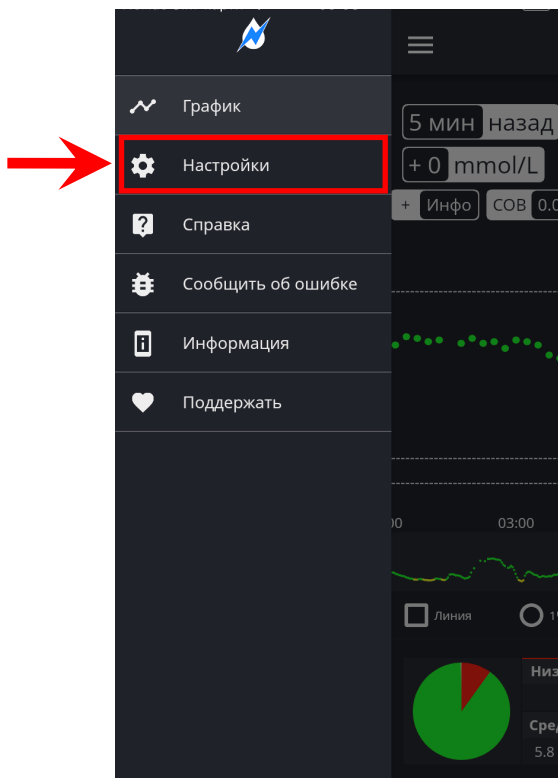

Наступним кроком потрібно вибрати поле **“URL”** та вставити у нього ключ (наприклад: `http://78.152.169.77:12002/spike/code`), згенерований додатком mHealth Connect або зібраний з веб, де **code**— код сенсора, та натиснути - Войти

Важливо! API Secret не має бути пустим або заповненим пробілами.

Налаштування у даному меню повинні бути виконані згідно рисунку нижче.

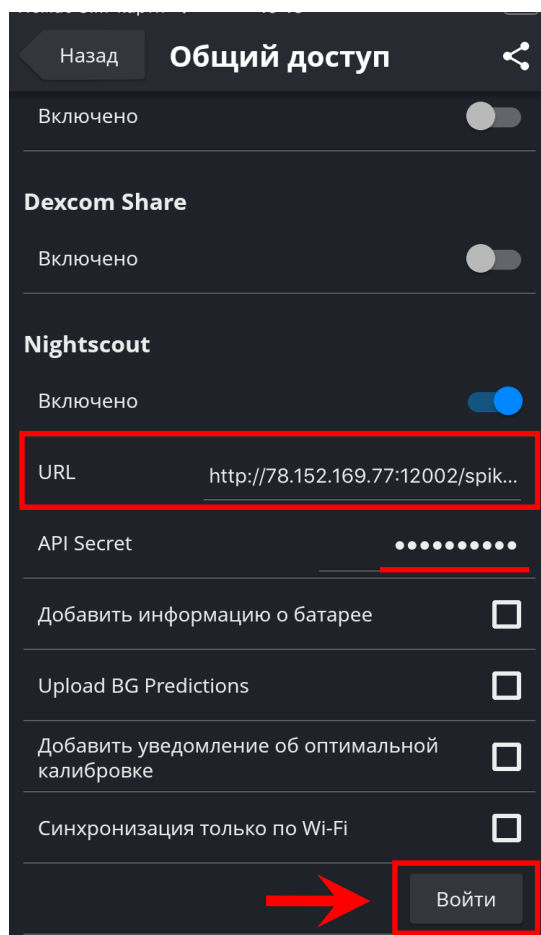

- Якщо все зроблено вірно та є стабільне інтернет з'єднання, через 5 хвилин (саме з наступного сканування) почнеться передача даних.
- В разі якщо передача пропущена по якійсь причині, дані зберуться у додатку та будуть надіслані при першій можливості.
- Переглянути свої дані можна у додатку mHealth Connect та на сайті web.mhealth.com.ua у особистому кабінеті.